

Bidetbecken

Das Einsatzbidet ist ein vielseitig anwendbares Hilfsmittel, dass bei zahlreichen Erkrankungen nützlich sein kann.



Dies sind zum Beispiel:

- Afterbad bei Hämorrhoiden
- Darmträgheit oder akute Infektionskrankheiten
- Dampfsitzbad bei Menstruationsbeschwerden, Unterleibsbeschwerden, Harn- und Blasenenerkrankungen, Nieren- und Darmkoliken

Das von der Dr. Junghans Medical GmbH gelieferte „Einsatzbidet“ ist NUR zum Einsatz in einem handelsüblichen WC-Becken geeignet. Es ist aus einem hochwertigen unzerbrechlichen Kunststoff hergestellt, heißwasserbeständig und leicht zu reinigen.

Es ist vorteilhaft für die tägliche Intimpflege und damit zur Krankheitsvorbeugung geeignet. Sitzbäder erfolgen meist nach ärztlicher Empfehlung.

Bidetbecken weiß

Art.Nr. 20130
PZN 0211145 

Bidetbecken blau

Art.Nr. 23130
PZN 1988172 

Bidetbecken grün

Art.Nr. 26130
PZN 1988166 

GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie die Toilettenbrille hoch und setzen Sie das Einsatzbidet mit dem Griff nach vorn in das Toilettenbecken ein. Füllen Sie nun das Bidet -in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung- mit Wasser. Seifen und Schaumbäder sind nicht zu empfehlen, da sie den natürlichen Infektionsschutz, den wichtigen Fettmantel der Afterhaut, zerstören könnten. Setzen Sie sich nun wie gewohnt auf die Toilette bzw. das Einsatzbidet und führen Sie das jeweilige Sitzbad durch.

Nach Beendigung heben Sie das Bidet am Haltegriff langsam nach oben, damit das Badewasser ablaufen kann. Spülen Sie das Einsatzbidet mit klarem Wasser aus und trocknen es ab.

HINWEIS

Das Bidet kann desinfiziert oder bei max. 100°C ausgekocht werden.

BITTE BEACHTEN

Das Badezimmer sollte warm, Fenster und Türen geschlossen sein, damit keine Zugluft entsteht, Es empfiehlt sich das Tragen von warmer Kleidung (Bademantel, Hausschuhe)

Badezusätze können bei bestimmten Patienten zu Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergien) führen. Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker.

ACHTUNG - NICHT STERILISIEREN

EIGENSCHAFTEN

Länge: ca. 42cm | Breite: ca. 36cm | Höhe: ca. 11cm
Fassungsvermögen: ca. 4,5 Liter
Material: Polypropylen - BPA-frei

GEFAHRENHINWEISE

Kein Spielzeug! Nicht zum Verzehr geeignet! Kinder dürfen das Einsatzbidet nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden! Achten Sie vor jeder Anwendung auf äußerliche Schäden! Bitte benutzen Sie keine defekten Produkte.

Plastikbeutel können gefährlich sein. ! **ERSTICKUNGSGEFAHR** ! Halten Sie diesen Beutel von Kindern fern. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sowie die Gefahrenhinweise vor der Anwendung sorgfältig durch.

Diese Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.dr-junghans.de/de/information/downloads

