


Frauendusche für die Reise

Art.-Nr 61031
PZN 08630999

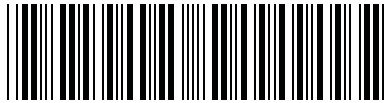

Die Frauendusche ist vormontiert und setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

- Pumpball aus Weich-PVC
- Glocke aus Weich-PVC
- Ansatzstück Frauenduschenrohr aus Polyethylen (ist auf Frauenduschenrohr aufgeschraubt)
- Dichtungsring aus Gummi
- Spülaufsatz mit Gewinde aus Polyethylen

Die Materialien sind auf Lebensmittelechtheit und Hautverträglichkeit geprüft.
Bei dieser Frauendusche handelt es sich um ein medizinisches Hygienehilfsmittel zur Spülung der Vagina.

Die Anwendung sollte unbedingt mit einem Frauenarzt besprochen werden, ganz besonders bei einer Schwangerschaft. Bei einer evtl. Beschädigung eines Einzelteiles ist das gesamte Set zu vernichten und zu entsorgen.

Beachten Sie bitte unsere Desinfektions- und Pflegehinweise.

Hygienische Vorbereitung und praktische Tipps

- Spülflüssigkeit vorher auf Körpertemperatur bringen und in den Ball einfüllen,
- das Rohr in den Ball eindrehen; die Glocke dient als Spritzschutz und kann zusätzlich montiert werden, (bitte beachten, dass sämtliche Teile fest montiert werden),

Vaginale Anwendung

- das Frauenduschenrohr befeuchten oder mit neutraler Creme einfetten (z. B. Vaseline) und vorsichtig in die Scheide einführen,
- Druckball vorsichtig zusammendrücken, bis sich keine Flüssigkeit mehr im Druckball befindet (eventuell mehrmals wiederholen, Flüssigkeit tritt aus)

Wichtig: um eine unerwünschte Saug- und Druckwirkung zu vermeiden, den Frauenduschenball im zusammengedrückten Zustand vorsichtig entfernen

Desinfektion und Pflege

Vor dem ersten und jedem weiteren Gebrauch desinfizieren. Reinigen Sie die Frauendusche wie folgt:

- Frauenduschenrohr aus dem Druckball ausdrehen, Glocke abziehen,
- reinigen Sie den Druckball, das Frauenduschenrohr und die Glocke von innen und außen mit reichlich Wasser,
- kurzzeitiges Abkochen (max. 1 min) ist möglich; legen Sie alle Teile in ein Bad mit kochendem Wasser; Achten Sie darauf, dass sich alle Teile in ausreichend sprudelndem Wasser lose schwimmend bewegen können.
- das Frauenduschenrohr kann bis 100°C sterilisiert werden – für dieses Teil ist auch Gassterilisation möglich, keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Sicherheitshinweise

Die Frauendusche ist kein Spielzeug und ist nicht zum Verzehr geeignet. Sie besteht aus verschluckbaren Kleinteilen und ist nicht mikrowellengeeignet. Das Produkt muss vor jeder Anwendung auf äußerliche Schäden kontrolliert werden. Benutzen Sie keine defekten Produkte! Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen, NICHT ÄTZENDEN Reinigungsmitteln.

Diese Gebrauchsanweisung finden Sie unter
www.dr-junghans.de/de/information/downloads

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sowie die Gefahrenhinweise vor der Anwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung auf.



 **Dr. JUNGHANS**[®]
MEDICAL-PRODUKTE • BABYARTIKEL