


Gebrauchsanweisung - Haarwaschbecken aufblasbar -


1. Blasen Sie den Luftring mit der Fußpumpe so lange auf, bis er fest ist.
Achtung: Zu starkes Aufpumpen kann das Haarwaschbecken zum Platzen bringen!
Verschließen Sie dann den das aufgeblasene Kissen mit dem Stöpsel.
2. Platzieren Sie den Patienten so, dass sein Kopf dicht an der Seite des Bettes liegt, an der Sie arbeiten wollen.
3. Schieben Sie das Kopfkissen soweit herunter, bis es unter Schulter und Hals des Patienten und nicht unter dessen Kopf liegt.
4. Schieben Sie das Haarwaschbecken unter den Kopf des Patienten.
5. Achten Sie darauf, dass der Ablaufschlauch in einen Auffangbehälter hängt. Der Auffangbehälter muss dabei auf dem Fußboden stehen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch sauber und offen ist, damit das Wasser später ungehindert abfließen kann.
6. Durchfeuchten Sie nun das Haar mit Hilfe einer mit Wasser gefüllten Waschschüssel und shampooen/ spülen Sie das Haar wie üblich. Das Wasser läuft in das Becken und über den Schlauch in den Auffangeimer.
7. Wenn das Wasser im Becken gehalten werden soll, verschließen Sie den Schlauch mit Hilfe der Verschlussklemme.
8. Reinigen Sie das Haarwaschbecken nach jedem Gebrauch gründlich mit einer milden Seifenlauge. Spülen Sie anschließend das Becken mit klarem Wasser aus, reiben es mit einem Handtuch aus und lassen es bis zum vollständigen Austrocknen aufgeblasen stehen.
9. Durch Herausziehen des Stöpsels kann die Luft aus dem Becken abgelassen werden. Falten Sie nun das Haarwaschbecken wieder zusammen.

Haarwaschbecken aufblasbar

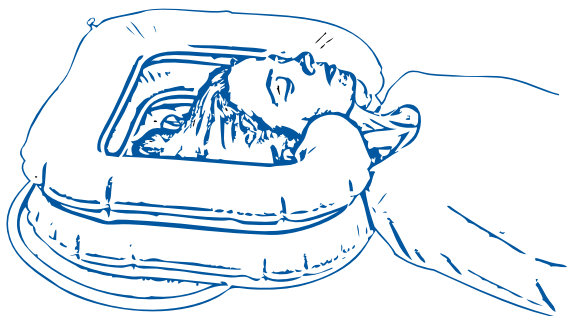

Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Haarwaschbecken komplett trocken ist, bevor es zusammengefaltet wird. Testen Sie die Temperatur des Waschwasser vorsichtig aus um Verbrühungen am Patienten zu vermeiden.
Das Haarwaschbecken ist kein Spielzeug und nicht zum Verzehr geeignet.
Kleinteile können verschluckt werden.

PZN *0802047*

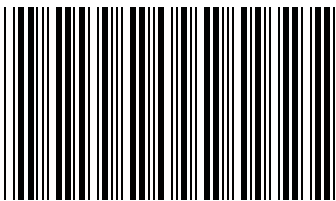

Art. Nr. 73041

 **Dr. JUNGHANS**®
MEDICAL-PRODUKTE • BABYARTIKEL

Dr. JUNGHANS medical GmbH . Käthe-Kollwitz-Straße 34 . 04651 Bad Lausick
Telefon 034345/5601-0 . info@dr-junghans.de . www.dr-junghans.de