

Gebrauchsanweisung Irrigator

Irrigator bestehend aus:

- 1 Stück Irrigatorbecher
- 1 Stück Irrigatorschlauch
- 1 Stück Hahn mit Gewinde
- 1 Stück Mutterrohr (groß) mit Gewinde
- 1 Stück Klistierrohr (klein) mit Gewinde

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle o.g. Bauteile erhalten haben und diese in einem einwandfreien Zustand sind. Bevor Sie mit dem eigentlichen Zusammenbau beginnen prüfen Sie bitte, ob sich die beiden mitgelieferten Rohre mit dem Hahn fest verschrauben lassen!

Setzen Sie die Irrigatorteile wie folgt zusammen:

- 1) Stecken Sie den Schlauch bis zum Anschlag auf das dafür vorgesehene Verbindungsstück am Irrigatorbecher.
- 2) Schieben Sie nun den Hahn in die andere Seite des Schlauches hinein.
- 3) **SCHRAUBEN Sie jetzt entweder das Klistier- ODER das Mutterrohr fest auf den Hahn.**

Stecken Sie auf keinen Fall das Mutterrohr auf das Klistierrohr.

A C H T U N G

Verwenden Sie den Irrigator niemals wenn sich die einzelnen Bauteile nicht wie vorab beschrieben zusammenbauen lassen! Ein Irrigator dient dazu, Flüssigkeiten unter verschiedenen Druckverhältnissen, mittels Schlauch und Irrigatorgarnitur, in den Darm oder in die Scheide zu leiten.

Eine Druckveränderung erreichen Sie durch Heben (starker Druck) oder Senken (geringer Druck) des Irrigatorbechers.

Verwenden Sie den Irrigator nur dann, wenn sie Darmerkrankungen oder andere Erkrankungen, für die die Anwendung eines Irrigators von Nachteil sein kann, ausschließen können.

Befragen Sie in jedem Fall vor einer Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser wird Ihnen auch Auskunft über die verwendbaren Flüssigkeiten geben.

Sicherheitshinweise

Der Irrigator ist kein Spielzeug. | **ACHTUNG:** verschluckbare Kleinteile. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. | Das Produkt muss vor jeder Anwendung auf äußerliche Schäden kontrolliert werden. | Benutzen Sie keine defekten Produkte! | Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen, **NICHT ÄTZENDEN** Reinigungsmitteln.

Diese Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.dr-junghans.de/de/information/downloads